

Laboratoriotiedote 55/2018 (kemia)

Äänekoski: Menetelmämuutos Äänekosken laboratorion Troponiini T –osoitustutkimukseen 1.6.2018 alkaen

Fimlabin Äänekosken laboratoriossa tehtävän Troponiini T:n osoitustestin menetelmä muuttuu. Käyttöön otetaan aiempaa pikatestiä herkempi ja kvantitatiiviselta tulosalueeltaan laajempi osoitustesti. Uusi menetelmä on sama kuin terveyskeskuksen osasto- ja vastaanottokäytössä oleva pikatestimenetelmä.

4464 B -Tnt-O

Troponiini T

Testin kvantitatiivinen mittausalue on 40 - 2000 ng/l. Tulokset vastataan muodossa:

- alle 40 ng/l
- numeerinen tulos alueella 40 - 2000 ng/l
- yli 2000 ng/l

Osoitustesti ei ole yhtä herkkä kuin keskussairaalan laboratoriossa käytössä oleva tutkimus 4532 P- Tnt.

Tulos ≥ 40 ng/l suositellaan varmistettavaksi P -TnT -tutkimuksella ja samoin tulos alle 40 ng/l aina, kun kliininen epäily sydänlihaskemiasta on vahva. B -TnT-O -tulos on suuntaa antava eikä tarjoa mahdollisuutta pitoisuusmuutoksen luotettavaan seurantaan.

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot tutkimuksesta ja sen tulkinnaasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta fimlab.fi, joka päivitetään muutosajankohtana.

Tiedustelut

Ammattilaisten palvelupuhelin 03 311 77800

Jaakko Uksila
Yli lääkäri